


Enlighten yra viena populiariausių balinimo sistemų Jungtinėje Karalystėje, garantuojanti pacientams B1 dantų spavos rezultatą per dviejų savaitių laikotarpį atliekant pilną Evo4 procedūrą.

Enlighten išskirtinumas - neutralus balinimo gelių pH. Tiek gaminant, gabenant, sandėliuojant ir atiduodant balinimo gelius pacientams yra užtikrinama žema temperatūra, neleidžianti išsiskirti rūgščiai bei taip išlaikant karbamido ir vandenilio peroksido gelių pH neutralumą ir efektyvumą sąlytyje su dantimis.

Evo4 balinimo rinkinyje rasite ir nujautrinimo pagaliukus - naudokite juos pagal poreikį - prieš ar po balinimo namuose procedūros. Tereikia nulaužti žaliai pažymėtą pagaliuko galą bei pasitepti dantis nujautrinančiu skysčiu. Ši procedūra užtikrins komfortą viso balinimo metu.

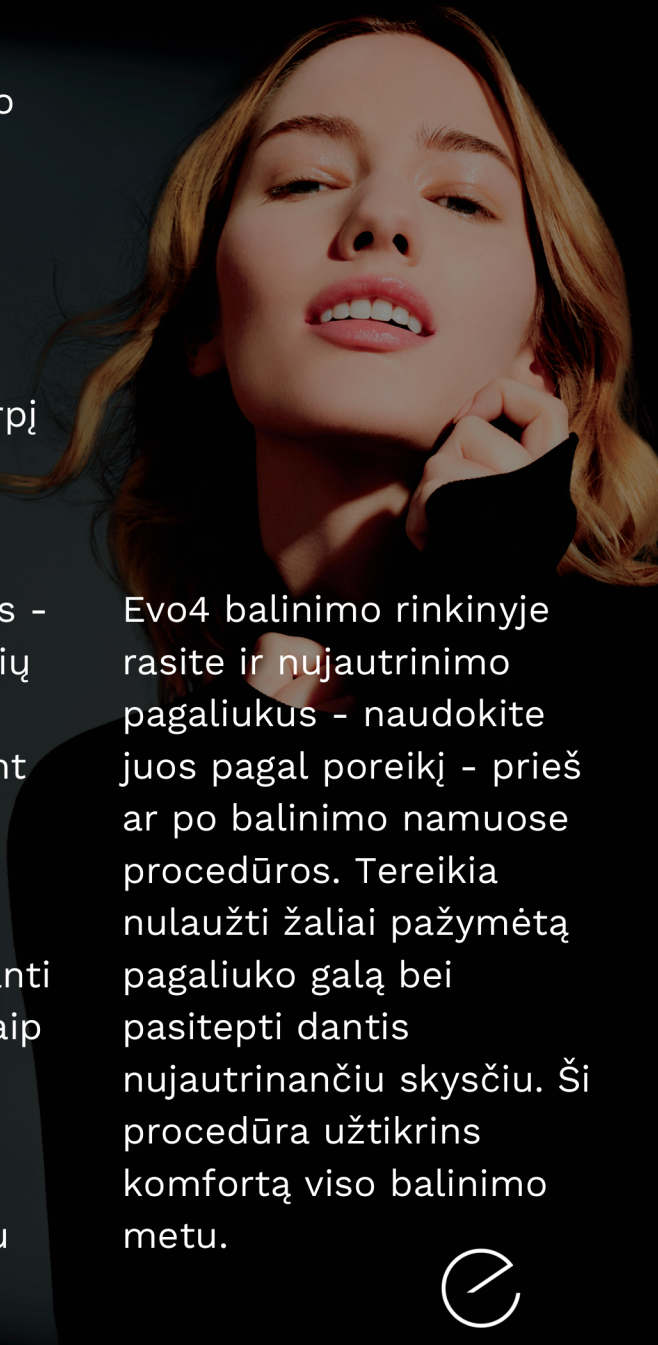

Evo4 naudojimo instrukcija

1. Balinami viršutiniai ir apatiniai dantys iš skruostinės pusės.
2. Pradedama balinti su 10% karbamido peroksido geliu (baltos spalvos) (pirma savaitė), ir tęsiama su 16% karbamido peroksido geliu (žalios spalvos) (antra savaitė) - balinama per naktį miego metu. Trečiasis gelis - 6% vandenilio peroksido gelis - naudojamas trečią savaitę 1 valandą per dieną dienos metu.
3. Ant kiekvieno danties dedamas balinimo gelio taškas. Krūminiai (2 galiniai kiekvienoje pusėje) ir protezuoti dantys nebalinami.
4. Vienos nakties maksimalus gelio kiekis yra pažymėtas ant gelio švirkšto.
5. Ant išvalytų dantų užsidėjus balinimo kapą su geliu su vata ar servetėle reikėtų nuvalyti gelio perteklių, kuris lieka ant dantenų viršuje ir apačioje.
6. Užsidėjus kapas gali būti jaučiamas diskomfortas dėl to, kad nepavyksta pilnai sukąsti, padidėja seilių išsiskyrimas.
7. Po naktinio balinimo, ryte, išsiėmus kapas dantų NEVALYTI, o tiesiog išsiskalauti; į švarias kapas, išvalytas dantų šepetuku, įdėti remineralizuojantį dantų kremą (GC Mousse) ir kapas dar palaikyti ant dantų bent 10-20 min. Jei remineralizuojantis dantų kremas nenaudojamas, po balinimo dantis valyti ne anksčiau kaip 30min.