

Enlighten[®] Evo4

Enlighten[®]
Evo4

Advanced Teeth Whitening System
Temperature Controlled Formulation
Micro Sealed Trays

This Pack Contains:
10% Carbamide Peroxide Syringe
16% Carbamide Peroxide Syringe
6% Hydrogen Peroxide Syringe
EvoSeal Pen



Step by Step Instructions



Brush with the Enlighten Serum Before and During the Treatment

Valykite dantis su Enlighten Serum prieš balinimą ir balinimo metu



Grab the Home Kit

Susipažinkite su naujuoju Evo4 rinkiniu




Grab the Trays

Susipažinkite su kapomis



Pick Up a Swab
Paimkite nujautrinimo pagaliuką

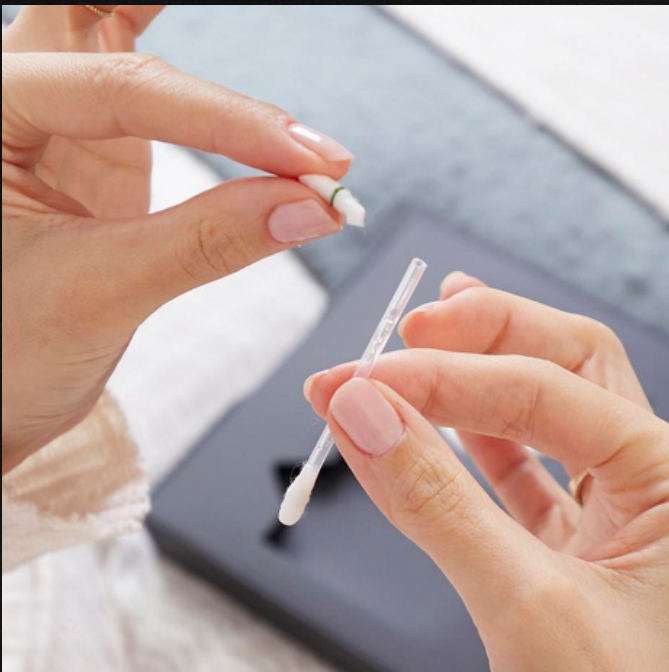

Snap the Green End and
Wait for The Liquid to Flow
Down to the Other Side

Nulaužkite žalią pagaliuko
galą bei palaukite kol skystis
subėgs į kitą pagaliuko pusę



Rub on the Upper & Lower
Teeth

Patrinkite viršutinius bei
apatinius dantis, ypač vietas kur
jaučiamas dantų jautrumas. Ant
dantėnų netepti.



- # Pick up Syringe 1
- # Paimkite gelį Nr. 1



- # Unscrew the Nozzle
- # Atsukite kamštelį



- # Attach the Applicator Tip
- # Prisukite aplikatorių



Break the End but Keep It to Reseal the Tip After Application

Nulaužkite aplikatoriaus galiuką, kurį galite pasilikti bei panaudojus uždėti atgal



Load both Trays with a Lentil Size Amount the Gel in each Tooth Compartment

Uždėkite lęšio dydžio tašką kapos viduje ant kiekvieno danties skruostinės pusės (išskyrus krūminius dantis)



Place Trays Superficially Over the Teeth

Palengva uždėkite kapos ant dantų bei lengvai prispauskite jas, bei servetėle nuvalykite nuo dantenų susidariusį perteklių



In the Morning, Rinse the Trays with Cold Water Only and Place Them Facing Down in the Case to Allow Water to Drain Before Next Use

Ryte plaukite po šaltu vandeniu bei laikykite taip, kad išdžiūtų vanduo



Repeat this process for
7 nights in Week 1 Overnight
7 nights in Week 2 Overnight
7 days in Week 3 for 1 hour/day

Kartokite šį procesą:
7 naktis gelį nr. 1
7 naktis gelį nr. 2
7 dienas gelį nr. 3 vieną valandą per dieną



Once You're Done With the 3-Week Treatment, Introduce the Enlighten White Toothpaste in Your Routine

Kai baigsite Enlighten Serum dantų pastą, naudokite Enlighten White